

令和元年9月13日

各位

シーホネンス株式会社

停電時における電動ベッド使用の注意点について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製電動ベッドをご使用になられているお客様につきまして、停電時における注意点がございましたので下記の通りご案内申し上げます。

- ① はじめに、電動ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。
停電からの復帰時にすべての電化製品が一斉に運転をはじめるとベッドが故障するなどの恐れがあります。
- ② ご使用いただいているベッドの取り扱い説明書をお読みになり、機種ごとの操作方法に応じて、次の作業を行ってください。
 - ・停電時においてベッドを水平にする方法が取り扱い説明書に記載されています。必要に応じて作業を行ってください。
 - ・医療施設・高齢者施設向け電動ベッドの一部機種にはバッテリーを搭載している機種があります。詳しくはご利用の機種の取り扱い説明書をご覧ください。
 - ・電動ベッド向け「セーフティハンドスイッチ」をお持ちのお客様は、適合するベッドの背（下げ）・膝（上げ・下げ）・高さ（下げ）を操作することができます。詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。
- ③ 電気が復旧したらベッドの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ご不明な点につきましては、ベッドをお求めになった販売店様、弊社営業担当、もしくは下記カスタマーサポートまでお問合せください。

○お問い合わせ先

シーホネンス株式会社 カスタマーサポート：0120-20-1001

以上